

一般医療機器

皮膚保護材 <皮膚バリア粘着プレート>

エフシート®

SILICONE GEL SHEET



f sheet

ADHESIVE GEL SHEET

SILICONE GEL SHEET

エフシートは、皮膚の保護を目的として開発されたシリコーンゲルシートです。

●用途

傷あと・火傷あとなどに貼付することにより
皮膚バリアとして外部からの刺激を和らげる皮膚保護材

●特徴

1. エフシートは、純度の高いシリコーンを使用した皮膚の保護を目的とするシートです。
2. エフシートは、強い粘着力を有し、皮膚を保湿し保護します。
3. エフシートは、伸縮性に富み、膝、肘などの関節可動部にも容易に貼付できます(図1)。
4. エフシートは、通常2～3週間繰り返し使用することができ経済的です。

●使用方法

1. 使用部位の大きさに合わせてシートのサイズを選んでください。1枚のシートで足りないときは複数のシートを使用してください。
2. 貼付部位はよく洗って、清潔な布などで水分をよく拭き取ってください。
3. 容器のふたを開け、付属のヘラを用いてエフシートを取り出してください(図2)。
4. 本品の接着面(初回開封時の上面)を使用する皮膚に貼ってください(図3)。
5. 膝、肘などの関節や、かかとなどの動きやすい部位に貼る場合は、必要に応じて伸縮性包帯やテープなどで軽く押さえてください。
6. 本品は、毎日24時間(入浴時を除く)使用することをお勧めします。
7. エフシートの接着面が汗やあかで汚れる場合がありますので、必ず毎日1～2回、以下の方法で洗ってください。
 - (1) エフシートを皮膚からはがし、入浴用石けんで軽くこするように洗ってください(図4)。石けんが残ると、かぶれの原因となりますので、水またはぬるま湯でよくすすいでください。
 - (2) エフシートを洗った後は、軽く振って水滴を落とし、ちりやほこりの少ない場所に接着面を上にして置き、自然に乾かしてください。濡れていると接着が悪くなるので十分乾かしてください。乾燥にあたっては、ヘアドライヤーなどでの加熱乾燥を避け、また、紙やタオルの繊維が接着面に付着して取れなくなることがあるので、ティッシュペーパーやタオルなどは用いないでください。
 - (3) 洗ったシートが乾いたことを確かめてから再び貼付してください。
 - (4) 洗っても汚れが落ちなかったり、皮膚への接着が悪くなったら、新しいシートに交換してください。



図1

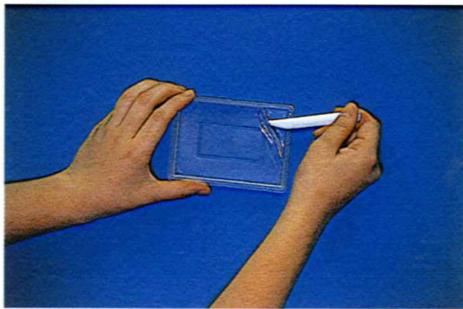


図2



図3



図4

●使用上の注意

1. 傷の治っていない場所や粘膜には貼らないでください。
2. 手術後の縫合創に使用する場合は抜糸後の創傷治癒を確認の上、貼付してください。
3. 伸縮性包帯やテープなどを用いる場合は、貼付部位を過度に圧迫しないでください。
4. 本品の使用中に皮膚の紅斑やそう痒など異常がみられた場合は、ただちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
5. 小児および監督を必要とする方は、保護者の指導のもとで使用してください。
6. 本品の接着面に付着した汗やあか、また貼付部位の汚れは紅斑やそう痒の原因になるので、必ず毎日1~2回、**使用方法7.**に従い、本品の接着面と貼付部位を洗い清潔に保ってください。

●取り扱い上の注意

1. 本品を口や鼻に入れると窒息の危険がありますので、小児および監督を必要とする方の手の届かない所に保管してください。
2. 本品は可燃物ですので、火のそばや熱いところには置かないでください。
3. 接着面が床などに付着すると滑りやすくなりますので、万一付着した場合は、水または石けん水を含んだ布でふきとってください。
4. 本品は、高温・多湿および直射日光を避けて保管してください。
5. 入浴時には取りはずしてください。
6. 未使用時は容器に入れ保管してください。
7. 排水管などの詰まりの原因になりますので、流しなどに流さないでください。



包装

| 大きさ | 包装数(1箱) |
|----------------------|---------|
| 1 シート 7.0 cm × 10 cm | 1 シート入 |
| 1 シート 2.5 cm × 15 cm | 2 シート入 |



製造販売元

株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

【お問合せ先】

株式会社富士薬品 医療用医薬品事業部 医薬営業部

☎048-644-3294 FAX 048-644-3498

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日を除く)